

KERRAFOAM™




GENTLE BORDER FOAM DRESSING

Ontworpen ter
bescherming van wonden




Aanbrenginstructie & vouwtechnieken

- 1 Reinig de wond/ huid volgens protocol.
De huid rondom de wond moet schoon en droog zijn voor een goede hechting.
- 2 Selecteer de juiste maat. De foam moet de wond met ongeveer 2 cm overlappen. **Het verband niet op maat knippen.**
- 3 Verwijder een van de schutbladen en breng het verband aan op de huid of wond.
- 4 Ter ondersteuning van de hechting, druk het klevende deel zacht aan op de huid.
- 5 Strijk het verband glad voor een goed contact tussen de foampad en de huid. Verwijder het andere schutblad.
- 6 Controleer regelmatig het verband en wissel op geleide van de klinische toestand van de wond, bij verzadiging of volgens protocol.





Vierkant/
Rechthoek

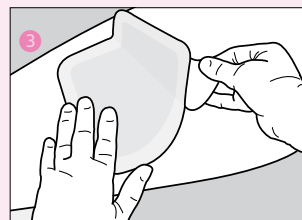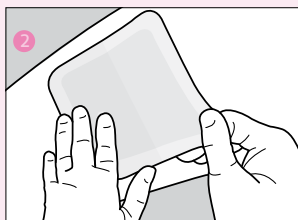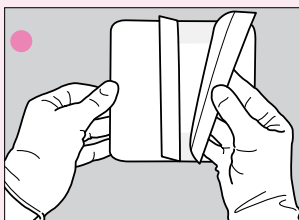

HIEL

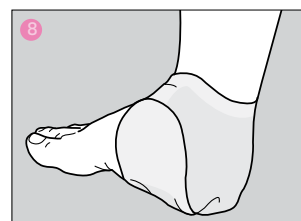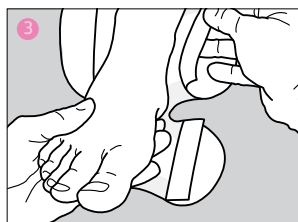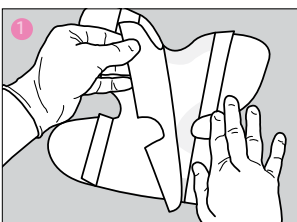

SACRUM

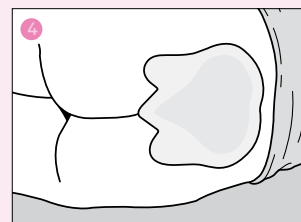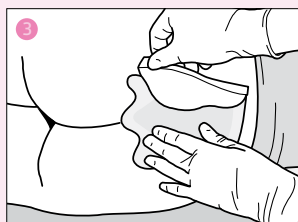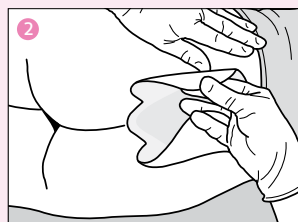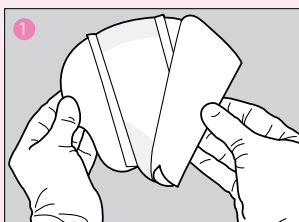



Gemaakt voor de bescherming van exsuderende wonden, voorzien van een zachte siliconen contactlaag.

Product code	Afmeting (afm. foam)	Verbanden per doos	ZI- nummer
CWL1010	7.5 x 7.5cm (5x5cm)	10	16782267
CWL1011	10 x 10cm (7.5x7.5cm)	10	16782275
CWL1012	10 x 20cm (7.5x17.5cm)	10	16782283
CWL1013	12.5 x 12.5cm (10x10cm)	10	16782291
CWL1023	17 x 17.5cm Sacrum	5	16782305
CWL1040	23 x 26cm Large Sacrum	5	16782348
CWL1024	23 x 25cm Hiel	5	16782283

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw account manager van KCI bij GD Medical, bellen met onze klantenservice op **040- 30 31 099** of kijken op **gdmedical.nl**