

VERKORTE INSTRUCTIE GLUNOVO FLASH

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

NB: indien u gebruik maakt van Glunovo Flash FGM graag deze instructie gebruiken

Glunovo® Flash
Flash Glucose Monitoring System

1. Download de GlucoFlash app uit de AppStore of Google Play.




2. Instellingen mobiele telefoon

- Schakel Bluetooth in.
- Geef toestemming voor meldingen.
- Bij Android; geef toestemming altijd toestaan locatie (niet bij alleen gebruik app).
- Android: geef toestemming gebruik geheugen.
- Zorg dat de app op de achtergrond altijd draait.
- Schakel de app opnieuw in als u uw telefoon opnieuw opstart.
- Activeer niet de batterij-besparingsfunctie of niet- storen functie.


3. Account aanmaken

In de app maakt u een account aan met uw e-mailadres en wachtwoord. Met dezelfde email/wachtwoordcombinatie logt u ook in op **glucoflashreport.nl** waar uitgebreide trends en rapportages staan en u gegevens kunt delen.

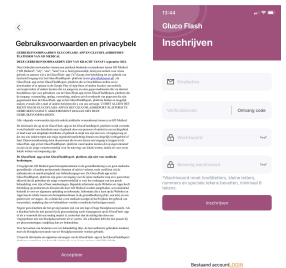

4. Instellen meeteenheid en drempelwaarden

Selecteer de meeteenheid van uw land (in NL mmol/L).
Stel uw drempelwaarde hoog en laag in.
Selecteer alarm aan of uit) en de alarmmelding (geluid en/ of trillen).

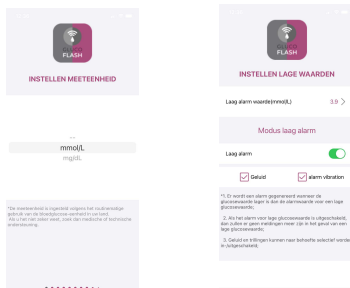

5. Kies de sensorplaats

Selecteer een plaats in het buikgebied.
Reinig desgewenst de huid met een alcoholdoekje en laat goed drogen.




Plaats sensor 5cm buiten de navel en 5cm buiten de insuline- injectieplaats.

Product niet gebruiken als de verpakking over datum of beschadigd is.


6. Verwijder de bescherm laagjes

Verwijder de bescherm laagjes voorzichtig en raak het kleefgedeelte niet aan.

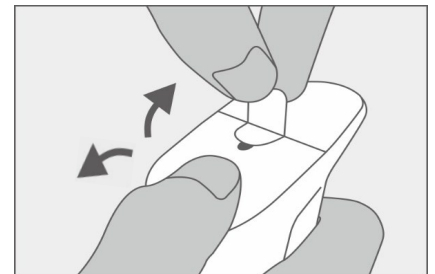


7. Ontgrendelen applicator

Houd de applicator vast en schuif het oranje knopje richting het ontgrendelsymbool.

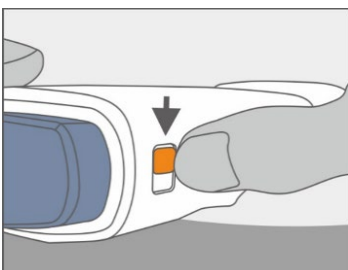


8. Plaatsen applicator

Plaats de applicator horizontaal op de buik.
Duw stevig aan zodat het kleefgedeelte goed vastzit.

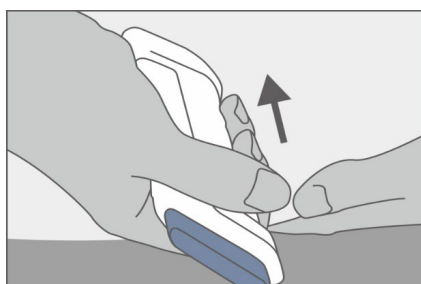

9. Inbrengen sensor


Druk op de bovenste knop en de sensor wordt automatisch geplaatst. Trek voorzichtig de applicator omhoog. Druk de randen van de sensorpleister goed aan.

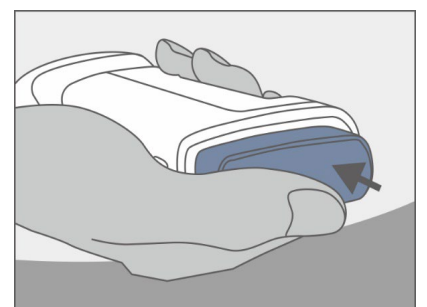

10. Zender aanbrengen

Plaats de zender met de puntige zijde eerst en duw vervolgens aan.


Er moeten duidelijk twee klikjes te horen zijn.

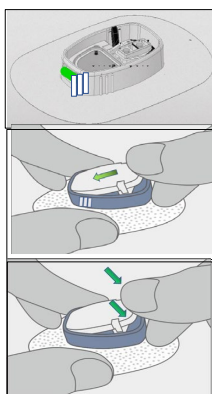

11. Zender koppelen

Voer het serienummer (SN) in, gevolgd door de PIN code.
PIN code = laatste 4 karakters van de SN.

Beide codes staan op de verpakking van de zender (transmitter). Bewaar de verpakking goed, aangezien deze codes bij elke sensor opnieuw ingevoerd moeten worden!

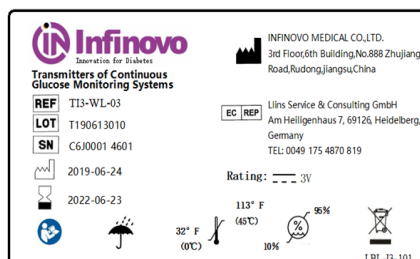

12. Lotnummer en Sensor Code invoeren

Het sensor LOT-nummer en de 4-cijferige Sensor Code (kalibratiecode) staan op de verpakking van de sensor.
Na invoer van deze nummers in de app klikt u op **START FGM**.



13. Initialisatietijd


Na start FGM begint automatisch de initialisatie of opwarmtijd. Deze duurt 2 uur (120 min).

Na deze 2 uur ziet u - na drukken op Flash- knop - uw glucose-waarden in de app.




14. GlucoFlash app menu's

In het Homescherm ziet u de meest recente waarde met een trendpijl. In de app kunt u o.a. een kalibratiewaarde invoeren (indien nodig), rapporten bekijken, gebeurtenissen invoeren en instellingen van alarmen aanpassen.

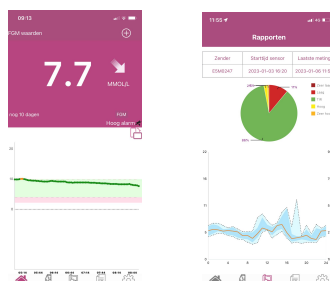

15. Einde sensorperiode; sensor vervangen/ verwijderen


Na 14 dagen is de sensorperiode voorbij. U krijgt van te voren een melding via de app om te vervangen. Ga naar Instellingen → Apparaatinformatie → Vervang huidige sensor.

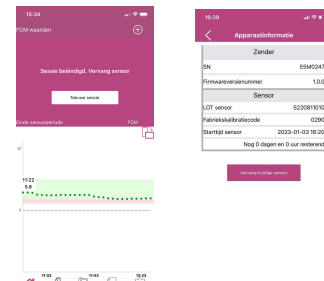

16. Sensor verwijderen


Het is het makkelijkste de sensor tegelijk met de zender verwijderen.

Zender niet weggooien! Deze kan 3 jaar gebruikt worden.

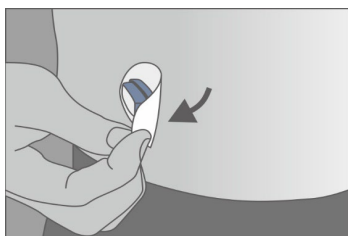

17. Zender losmaken van sensor

Gebruik het oranje sleuteltje (in verpakking zender) en duw de puntjes van het sleuteltje in de uitsparingen van de zender. Trek met het sleuteltje de zender omhoog uit de sensor. Sensor kan bij huishoudelijk afval. Zender niet weggooien!

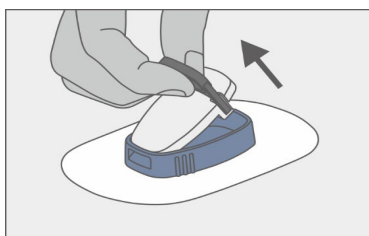

18. Nieuwe sensorperiode starten

Volg de stappen in de app en/ of ga terug naar stap 5 van deze Verkorte handleiding.

Voor uitgebreide instructie, raadpleeg de handleiding in de verpakking of de instructie video.

De instructie video en overige productinformatie kunt u vinden op www.glunovoflash.nl