



Prevena™
Incision Therapy

3M™ Prevena™ Therapy Scorecard

Date: _____

Diagnostic: _____

Indications d'utilisation du système de gestion des incisions 3M™ Prevena™

ICD*	Facteurs de risque des patients	Chirurgie Orthopédique		Chirurgie Plastique		Chirurgie Cardiaque		Chirurgie Vasculaire		
		Score recommandé	Score	Score recommandé	Score	Score recommandé	Score	Score recommandé	Score	
E66	IMC > 35 kg/m ²	2 ⁴		1		1		2 ¹		
	IMC > 18,5 kg/m ²	1						1		
	Anticoagulation sans AAS	1		1						
F17	Fumeur actif	1		1				1		
E10; E11; E12; E13; E14	Diabète sucré	2 ⁴		1		1		2 ¹		
Z94	Immunodéficience	1		1						
N18/N19	Maladie rénale chronique / insuffisance rénale	1		1				2 ¹		
	Staphylocoque doré nasal	1		1						
J44	BPCO	1		1		1		1		
	Radiothérapie postopératoire			1						
	Âge > 80 ans					1				
	Âge > 50 ans							2 ¹		
E43; E44.0; E44.1; E64.0; R64; R63.3	Malnutrition avec albumine <35 g/l, protéines <65 g/l, transferrine <2 g/l							1		
	Excroissance significative du tissu conjonctif							1		

Total

Indications d'utilisation du système de gestion des incisions 3M™ Prevena™

Facteurs de risque liés à la procédure	Chirurgie Orthopédique		Chirurgie Plastique		Chirurgie Cardiaque		Chirurgie Vasculaire		
	Score recommandé	Score	Score recommandé	Score	Score recommandé	Score	Score recommandé	Score	
Chirurgie de révision	2 ⁴				1		1		
Amputation au-dessus ou au-dessous du genou	1						1		
Réduction ouverte et fixation interne des fractures (Acetabulum, Pilon, Calcanéum et Plateau Tibial)	1								
Chirurgie d'urgence	1				1		1		
Durée de l'opération chirurgicale prolongée (durée de l'opération > 142 minutes pour le vasculaire) ^{1,3}	1		1		1		2 ¹		
Traumatisme des tissus mous	1						1		
Risque de contamination	1		1		1		1		
Incision à haute tension	1		1		1		1		
Incision répétée	1		1		1		1		
Plastie abdominale post-bariatrique			1						
Reconstruction mammaire			1						
Fasciite nécrosante			1						
Sernotomie ³					1				
Transfusion avec une hémoglobine <8 mg/dl _i							1		
Implantations de greffons synthétiques							1		
Longueur de la plaie > 8 cm							1 ¹		
Total									
Montant total									

*Les codes correspondent à ICD-10 2019.

À partir de >= points, l'utilisation du système de gestion des incisions 3M™ Prevena™ est recommandée.

Brève justification:

- ☐ Éviter une intervention de révision
- ☐ Patient à risque en raison d'un score élevé
- ☐ Autre:

Étiquette du patient:

Remarque: Il existe des indications, des limitations, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des informations de sécurité spécifiques pour ces produits et thérapies. Veuillez consulter un clinicien et le mode d'emploi du produit avant toute application.

Avertissement : le contenu de la Prevena Therapy Scorecard a été rédigé en toute connaissance de cause et en coopération avec

Son contenu doit servir de recommandation et ne prétend pas à l'exhaustivité. Toute responsabilité de 3M Medical Solutions dans l'utilisation de la Scorecard est exclue.

1 Pleger SP, Nink N, Elzien M, Kunold A, Koshty A, Böning A. Reduction of groin wound complications in vascular surgery patients using closed incision negative pressure therapy (ciNPT): a prospective, randomised, single-institution study. *Int Wound J*. 2018;15(1):75–83. doi:10.1111/iwj.12836.

2 Kwon J, Staley C, McCullough M, et al. A randomized clinical trial evaluating negative pressure therapy to decrease vascular groin incision complications. *J Vasc Surg*. 2018;68(6):1744–1752. doi:10.1016/j.jvs.2018.05.224.

3 Willy C, Agarwal A, Andersen CA, et al. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. *Int Wound J*. 2017;14(2):385–398. doi:10.1111/iwj.12612.

4 Anatone AJ, Shah RP, Jennings EL, Geller JA, Cooper HJ. A risk-stratification algorithm to reduce superficial surgical site complications in primary hip and knee arthroplasty. *Arthroplast Today*. 2018;4(4):493–498. Published 2018 Oct 15. doi:10.1016/j.artd.2018.09.004

En Belgique, distribué par:



GD Medical Belgium B.V. · Rue Abbé Cuyper 3, B-1040 Brussel
Tel +32 (0) 2 808 58 80 · customerservice@gdmedical.be · www.gdmedical.be

3M Belgium BVBA/SPRL Health Care · Hermeslaan 7 · 1831 Diegem · Tel +32 2 722 5133
3M_email_healthcare_be@mmm.com · www.3Mbelgique.be/medical

3M (Schweiz) GmbH Health Care · Eggstrasse 91 · 8803 Rüschlikon · Tel +41 (0)44 724 90 90 · innovation.ch@mmm.com · www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

